


EASYGRIP FLO-41

SISTEMA DE APLICACIÓN DE FLOSEAL MIS

1 Carga y aplicación de producto

Dentro del campo estéril

1

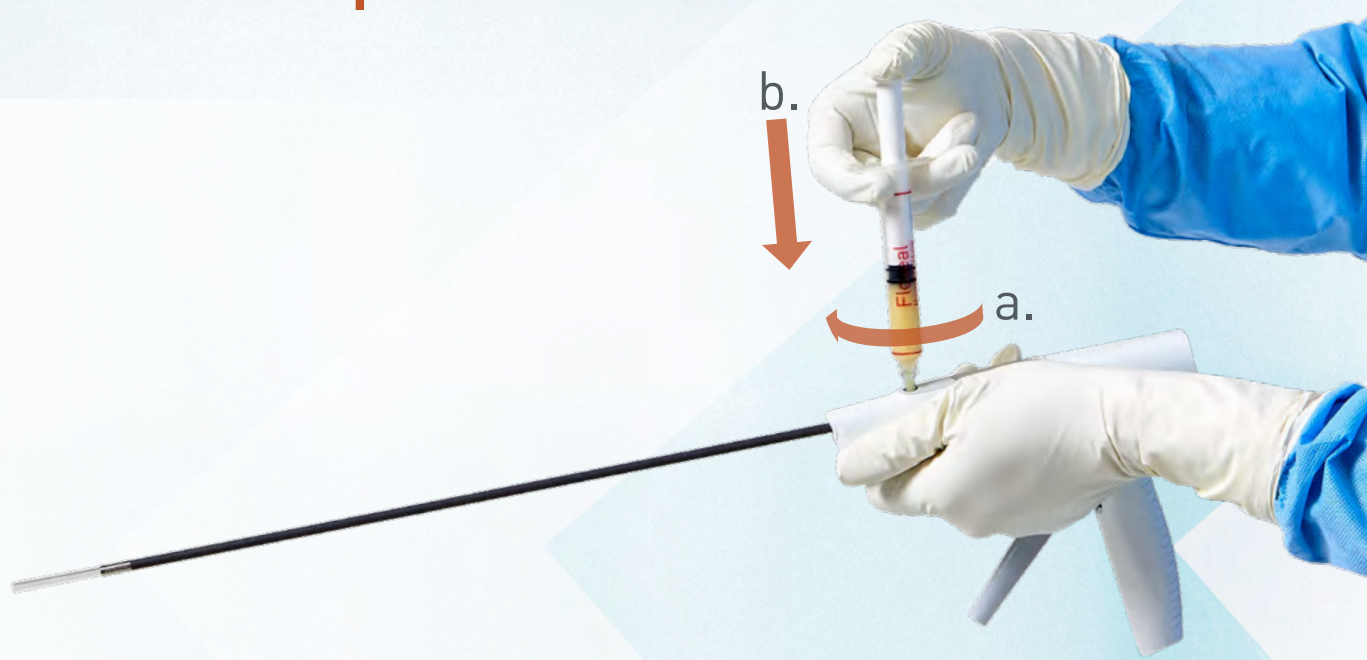

a) Inserte la jeringa del agente hemostático al puerto de llenado del sistema EASYGRIP FLO-41.
 b) Llene el depósito completamente con el agente hemostático.
Se puede quitar la jeringa si así lo desea¹.

2



Cebe la cánula tirando repetidamente del gatillo (aproximadamente 2-3 tirones) hasta que se vea agente hemostático en la punta moldeable. El sistema EASYGRIP FLO-41 está listo para utilizarse ahora¹.

3




Tire del gatillo del sistema EASYGRIP FLO-41 para aplicar la matriz hemostática según sus instrucciones. Pueden ser necesarios muchos tirones para aplicar la cantidad deseada de agente hemostático.

Si se requiere FLOSEAL adicional durante el mismo procedimiento quirúrgico, repita los pasos 1 y 3. El paso de cebado no es necesario¹.

2 Aplicación del producto residual Dentro del campo estéril

1

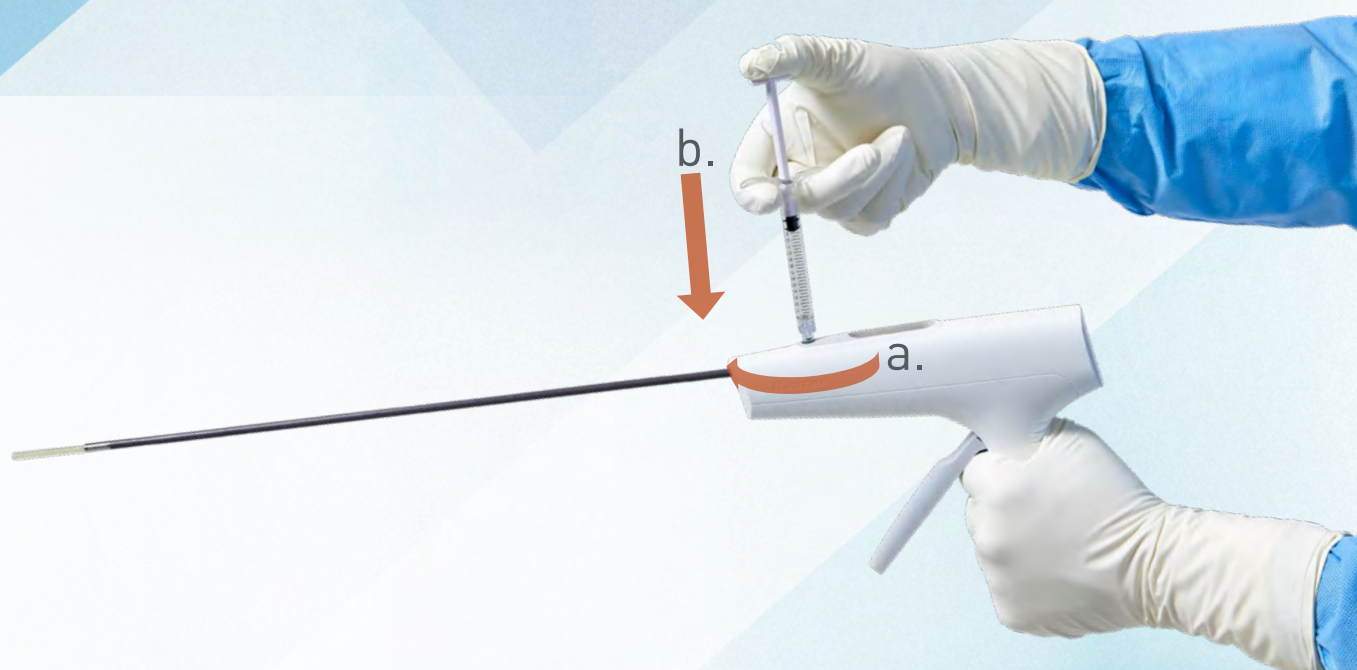

Si es necesario aplicar agente hemostático residual, **rellene la jeringa de 1,5 mL suministrada con solución salina no heparinizada.** Inserte la jeringa de salina en el sistema EASYGRIP FLO-41 y **rellene el depósito solo con 1,5 mL de solución salina no heparinizada¹.**

2



Pulse el gatillo del sistema EASYGRIP FLO-41 para aplicar el agente hemostático residual¹.

3



Si después de expulsar todo el producto residual de la cánula es necesario aplicar agente hemostático adicional, se debe retirar la cánula y purgar la solución salina. **Retire la solución salina de la cánula y purgue el aplicador para un nuevo uso¹.**

Advancing the art of healing

Indicaciones

El sistema EASYGRIP FLO-41 está indicado para dispensar una matriz hemostática FLOSEAL² en zonas con sangrado mediante un trócar de 5 mm o más¹.

Advertencias

- Un solo uso. No reutilizar. No reesterilizar. La reutilización o el reprocesado de un dispositivo de un solo uso puede llevar a la contaminación y a alterar la función del dispositivo o su integridad estructural.
- No utilice el sistema EASYGRIP FLO-41 si el envase está dañado o abierto, o si el aplicador está dañado, ya que podría comprometer la función del dispositivo.
- No utilice aire como propulsor para expulsar agente hemostático del sistema EASYGRIP FLO-41.
- No utilice el sistema EASYGRIP FLO-41 para manipular o retraer órganos o tejidos.
- No doble la punta moldeable contra órganos o tejidos¹.

Esterilizado mediante irradiación.

Lea las instrucciones de uso completas para mayor detalle.

Para cuestiones relativas a información de pedidos, por favor contacte con el Delegado de Baxter de la zona.

1. Instrucciones de Uso EASYGRIP FLO-41. Precision MIS delivery system. Baxter Healthcare SA. Zurich 2019.

2. Instrucciones de Uso Floseal Matriz Hemostática. Baxter Healthcare S.A. Zürich 2012.

FLOSEAL y EASYGRIP son productos sanitarios y tienen la marca CE de conformidad con los requisitos de la Directiva del Consejo Europeo 93/42/EEC y cumplen con los requisitos de la normativa española aplicable.

CÓDIGOS DE PRODUCTO

EASYGRIP FLO-41	Caja de 6	ADS201865
FLOSEAL Matriz Hemostática, 5 ml ²	Caja de 6	1503353

Advanced Surgery



Baxter, S.L.

Sede Corporativa

Parque Empresarial San Fernando
Edificio Londres. Avenida de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares - Madrid
☎ +34 91 678 93 00

www.baxter.es

Sede Social

Polígono Industrial Sector 14
C/ Pouet de Camilo, nº 2
46394 Ribarroja del Turia - Valencia
☎ +34 96 272 28 00

Baxter