

# Pasos de aplicación

## Tan fácil como 1, 2, 3.

Para más información referirse a las instrucciones de uso que acompañan al producto



1 Aplique HEMOPATCH **seco** sin humedecer directamente sobre la superficie sangrante o la lesión tisular con los cuadrados azules hacia afuera. El tamaño del parche debe ser tal que sobrepase los márgenes de la herida en al menos 1 cm.<sup>1</sup>



2 Utilice una **gasa o una compresa seca** para ejercer una presión suave y uniforme sobre toda la superficie del parche durante 2 minutos.<sup>1</sup>



3 Retire la gasa, humedeciéndola si fuera preciso. **Una vez lograda la hemostasia dejar HEMOPATCH in situ.**<sup>1</sup>

## El parche hemostático flexible que sella el sangrado<sup>1</sup>

Sella la superficie sangrante<sup>1</sup>

Descripción de Producto	Tamaño	Parches por caja	Código de pedido
HEMOPATCH caja: tamaño mediano	4,5 x 4,5 cm	3	1503746
HEMOPATCH caja: tamaño grande	4,5 x 9,0 cm	3	1503747



Caja de  
3 unidades

**Indicaciones de uso:** HEMOPATCH está indicado como dispositivo hemostático en procedimientos quirúrgicos cuando el control de la hemorragia mediante presión, ligadura o procedimientos convencionales es ineficaz o poco práctico. **Contraindicaciones:** No ejerza una presión excesiva cuando aplique HEMOPATCH sobre el área de sangrado ni lo utilice intravascularmente. No se debe utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida a las proteínas bovinas o al colorante azul brillante (azul FD&C N.º 1 (azul 1)). **Advertencias:** HEMOPATCH no está diseñado para su uso en caso de sangrado pulsátil, grave. No se recomienda el uso de HEMOPATCH en presencia de una infección activa. Cuando se utilice en, alrededor o cerca de forámenes óseos, zonas limitadas por estructuras óseas, médula espinal y/o nervios ópticos y quiasma, se debe tener cuidado para evitar aplicar un exceso de producto (los colágenos se expanden al absorber líquido), que pueda ocasionar daños a los nervios. HEMOPATCH no está diseñado ni como sustituto de una técnica quirúrgica meticulosa ni para la aplicación correcta de ligaduras u otros procedimientos convencionales para lograr la hemostasia.

1. Instrucciones de uso Hemopatch. Zürich, Suiza: Baxter Healthcare SA; 2013.

BAXTER y HEMOPATCH son marcas registradas de Baxter International Inc.

**Baxter S.L. - Dirección Comercial y Marketing**

Parque Empresarial San Fernando Edificio Londres, 28830 - Madrid

+34 91 678 93 00

www.baxter.es